

Provtagningsinstruktioner för ImuPro-analys

Till patienten:

Du behöver inte vara fastande. Du bör inte ta provet om du har feber.
Konsultera din terapeut först om du får stark cortison- eller cellgiftsbehandling.
Fyll i dina personuppgifter på laboratoriebeställningen. Födelsedatumet måste fyllas i, i omvänd ordning, d.v.s. dag-månad-år (årtal med fyra siffror). Glöm inte kryssa för vilket test du önskar beställa.
Frankera det adresserade kuvertet med porto om 42 kr.
Efter provtagningen, (och centrifugering mm), lägg provet i transportröret och förslut det väl. Lägg transportröret och den ifyllda laboratoriebeställningen i det adresserade kuvertet. Skicka det till CTL & Ortholabor med vanlig post.

Till provtagningspersonalen:

Vi ber om hjälp med blodprovstagning på denna patient enligt anvisning nedan. Provet kommer att analyseras på ett laboratorium med avseende på IgG antikroppar för att utreda eventuell typ III födoämnesallergi.

Patienten står själv för provtagningskostnaden om kontant betalning är möjligt. Annars faktureras kostnaden till oss.

- Vänligen ta 4-5ml venöst blod från patienten. Använd vanligt serumrör med gel.
- Låt provet svalna.
- Centrifugera blodet enligt rörtillverkarens anvisningar.
- Tappa över serumet till ett enkelt tomt rör (t.ex. ellermanrör) och förslut det väl.
- Märk serumet med patientens namn och födelsedatum (dag-månad-år, årtal med fyra siffror), ej personnumret!

Om ni har möjlighet, ber vi er vänligen att posta provet åt patienten, förutsatt att patienten har lämnat ett frankerat och adresserat kuvert, ett ifyllt labbformulär samt en transporthylsa till er. I så fall slipper patienten att vänta på serumet samtidigt som ni kan centrifugera provet när ni har flera prov att fylla centrifugen med.

Om något är oklart, vänligen kontakta Amodo Medical på telefon 08-579 191 80 eller på info@imupro.se. Information om testet ImuPro finns på www.imupro.se.

Tack för hjälpen!